






Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

Descrizione:	<p>Le suture in poliestere Ti-Cron™ - Surgidac™ sono suture chirurgiche sterili non assorbibili composte da polietilene tereftalato. Sono preparate da fibre di alto peso molecolare, a catena lunga, con ricorrenti anelli aromatici come componente integrale. Le suture di tipo intrecciato Ti-Cron™ sono disponibili non rivestite o rivestite da uno strato uniforme di silicone per aumentarne la lubrificazione della superficie e quindi per migliorare le caratteristiche di maneggevolezza, facilitarne il passaggio nei tessuti e per le proprietà di scorrevolezza dei nodi. Le suture monofilamento Surgidac™ sono non rivestite e le suture intrecciate Surgidac™ sono disponibili non rivestite o rivestite uniformemente con adipato di polibutilene.</p>
Caratteristiche:	<p>Le suture in poliestere Ti-Cron™ - Surgidac™ hanno elevata resistenza tensile, sia lineare che al nodo che attribuiscono alla sutura:</p> <ul style="list-style-type: none">- Massima sicurezza nell'approssimazione di tessuti sottoposti a tensione- Supporto permanente (resistenza tensile costante nel tempo)- Massima sicurezza nell'applicazione di impianti protesici- Il particolare processo di intreccio e il rivestimento uniforme in silicone agevolano il passaggio della sutura attraverso i tessuti mantenendo un'ottima sicurezza di tenuta del nodo"
Indicazioni:	<p>Le suture in poliestere Ti-Cron™ - Surgidac™ sono indicate per l'uso in tessuti molli per approssimazione e/o legatura, compreso l'impiego in chirurgia cardiovascolare, oftalmica e per tessuti neurali.</p>
Azioni:	<p>Le suture in poliestere Ti-Cron™ - Surgidac™ sviluppano una reazione infiammatoria acuta di minima entità nei tessuti, seguita da un progressivo incapsulamento della sutura dal tessuto connettivo fibroso.</p>
Resistenza tensile:	<p>Le suture in poliestere Ti-Cron™ - Surgidac™ non vengono assorbite e non è nota alcuna modifica significativa della resistenza alla trazione in vivo.</p>
Sterilizzazione:	<p>Le suture in poliestere Ti-Cron™ - Surgidac™ nei calibri 6-0 o inferiore e con pledget sono sterilizzate a ossido di etilene. I calibri 5-0 o superiori sono sterilizzati a raggi gamma.</p>
Confezionamento:	<p>Le suture in poliestere Ti-Cron™ sono disponibili colorate con blu D&C N.6 o in colore (bianco) e intrecciate, rivestite o non rivestite, nei calibri da 5 (7 metrico) a 7-0 (0.5 metrico).</p> <p>Le suture in poliestere Surgidac™ sono disponibili in colore (bianco) o colorate con D&C verde N.6 e intrecciate, rivestite o non rivestite, nei calibri da 5 (7 metrico) a 7-0 (0,5 metrico).</p> <p>Le suture sono fornite sterili, in pretagliati e bobine, non montate, o montate su aghi di vari tipi con attacco permanente o a rilascio a comando; in confezioni da una, due o tre dozzine.</p> <p>Le suture in poliestere Ti-Cron™ sono disponibili con pledgets in PTFE (politetrafluoroetilene) utilizzati come cuscinetto tra la sutura e la superficie del tessuto al fine di aumentare l'area di carico.</p>



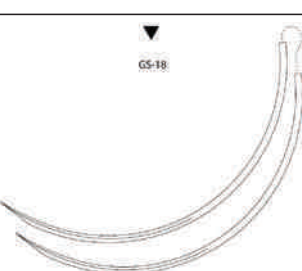
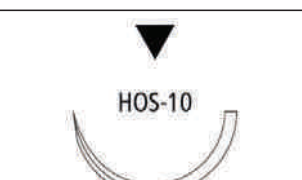

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

Fili liberi								
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice	
PRETAGLIATE	1	4	6x45	BLU	24		8886300172	
	0	3.5	6x45	BLU	24		8886300162	
	0	3.5	6x75	BLU	24		8886300262	
	2-0	3	12x45	BLU	36		8886300851	
	2-0	3	12x75	BLU	24		8886300352	
	2-0	3	5x45	BIANCO	12		8886301151	
	3-0	2	6x45	BLU	36		8886300141	
	3-0	2	12x75	BLU	24		8886300342	
	3-0	2	12x45	BLU	36		8886300841	
	4-0	1.5	12x45	BLU	36		8886300831	
	4-0	1.5	12x75	BLU	24		8886300332	
	5-0	1	12x45	BLU	36		8886300821	
	BOBINA	5	7	150	BLU	24		8886338189
		4	6	150	BLU	24		8886338109
2		5	250	BLU	24		8886338082	
1		4	250	BLU	24		8886338072	
0		3.5	250	BLU	24		8886338062	
2-0		3	250	BLU	24		8886338052	
3-0		2	250	BLU	24		8886338042	

Tagliente Esterno							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
C-1 3/8 Cerchio 12mm 	5-0	1	45	BLU	36		8886304321

Tagliante Esterno							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
C-12 3/8 Cerchio 16mm		4-0	1.5	75	BLU	36	8886304631
		5-0	1	45	BLU	36	8886304521
C-13 3/8 Cerchio 19mm		2-0	3	75	BLU	36	8886304851
		3-0	2	75	BLU	36	8886305541
		3-0	2	45	BLU	36	8886304741
		4-0	1.5	45	BLU	36	8886304731
C-14 3/8 Cerchio 24mm		0	3.5	90	BLU	36	8886306561
		0	3.5	75	BLU	36	8886305061
		2-0	3	90	BLU	36	8886306551
		2-0	3	75	BLU	36	8886305051
		3-0	2	75	BLU	36	8886305041
		3-0	2	45	BLU	36	8886306941
C-15 3/8 Cerchio 26mm		2-0	3	75	BLU	36	8886307051
		2-0	3	45	BLU	36	CDC7041
C-16 3/8 Cerchio 30mm		1	4	75	BLU	36	8886302371
		0	3.5	90	BLU	36	8886301261
		0	3.5	75	BLU	36	8886302361
		2-0	3	75	BLU	36	8886302351

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

Tagliente Esterno							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
C-17 3/8 Cerchio 39mm 	2	5	75	BLU	36		8886305481
	1	4	75	BLU	36		8886305471
	0	3.5	75	BLU	36		8886305461
	2-0	3	75	BLU	36		8886305451
GS-18 3/8 Cerchio 77mm (Non in scala) 	5	7	45	BLU	12		8886305689
GS-18 3/8 Cerchio 77mm (Super rinforzato) (Non in scala) 	5	7	75	BLU	24		8886312879
	2	5	75	BLU	24		8886312882
	2	5	75	VERDE	24		CD496
HOS-10 1/2 Cerchio 26mm 	2	5	75	BLU	36		8886339581
	1	4	75	BLU	36		8886339571
	0	3.5	75	BLU	36		8886339561
	2-0	3	75	BLU	36		8886339551
GS-11 1/2 Cerchio 37mm 	4	6	75	BLU	36		8886315409
	1	4	75	BLU	36		8886330971
	0	3.5	75	BLU	36		8886330961
	2-0	3	75	BLU	36		8886330951

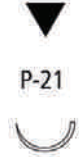
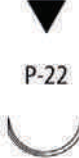

Tagliante Esterno							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
HOS-11 1/2 Cerchio 37mm 	2	5	75	BLU	36		8886302881
	1	4	75	BLU	36		8886302871
GS-12 1/2 Cerchio 40mm 	2	5	75	BLU	36		8886315581
HOS-12 1/2 Cerchio 40mm 	2	5	75	BLU	36		8886302681
	1	4	75	BLU	36		8886302671
HOS-14 1/2 Cerchio 55mm (Non in scala) 	5	7	75	BLU	36		8886302779
SC-1 Retto 51mm (Non in scala) 	1	4	75	BLU	36		8886316371
	0	3.5	75	BLU	36		8886316361
	2-0	3	75	BLU	36		8886316351

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

Tagliente Esterno							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
SC-2 Retto 60mm (Non in scala) 	0	3.5	75	BLU	36		8886306261
	2-0	3	90	BLU	36		8886316551
	2-0	3	75	BLU	36		8886306251
	3-0	2	75	BLU	36		8886306241
SC-250 Retto 250mm (Super rinforzato) (Non in scala) 	2-0	3	75	BLU	12		8886294753




Punta di precisione, Tagliente Esterno							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
P-13 3/8 Cerchio 13mm 	4-0	1.5	45	BLU	12	Surgalloy™	SCD3059G
	4-0	1.5	45	BIANCO	12	Surgalloy™	8886286234
	5-0	1	45	BLU	12	Surgalloy™	SCD3058G
	5-0	1	45	BIANCO	12	Surgalloy™	SCD2864G
P-12 3/8 Cerchio 19mm 	4-0	1.5	45	BLU	12	Surgalloy™	SCD3049G



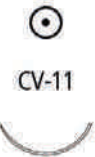
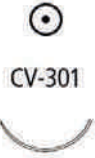

Punta di precisione, Tagliente Esterno

Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
P-21 1/2 Cerchio 9mm 	4-0	1.5	45	BIANCO	12		8886285433
P-22 1/2 Cerchio 13mm 	3-0	2	45	BLU	12	Surgalloy™	8886310943
P-24 1/2 Cerchio 16mm 	2-0	3	45	BLU	12	Surgalloy™	8886305953

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita




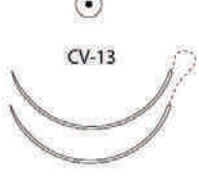
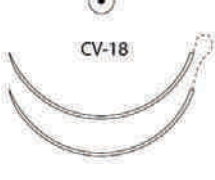
Taglio Convenzionale							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
SCC 1/2 Cerchio 48mm 	5	7	5x75	BLU	6		8886312779


Punta di precisione a spatola							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
SS-24 1/4 Cerchio 9mm (Super rinforzato) 	5-0	1	45	BIANCO	12	Surgalloy™	CD3123K
	6-0	0.7	45	BIANCO	12	Surgalloy™	CD3113K
	4-0	1.5	45	BIANCO	12	Surgalloy™	D1763K
	5-0	1	45	BIANCO	12	Surgalloy™	D1764K
SS-2 1/2 Cerchio 9mm (Super rinforzato) 	5-0	1	45	BIANCO	12	Surgalloy™	CD0423K
	4-0	1.5	45	BIANCO	12	Surgalloy™	D1779K
	5-0	1	45	BIANCO	12	Surgalloy™	D1780K
SS-14 1/4 Cerchio 9mm (Super rinforzato) 	5-0	1	45	BIANCO	12	Surgalloy™	D1760K
	6-0	0.7	45	BIANCO	12	Surgalloy™	D1722K

Cilindrico								
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice	
CV-1 3/8 Cerchio 9mm (Super rinforzato)		6-0	0.7	60	BLU	36	Surgalloy™	CDC800
CV-310 3/8 Cerchio 10mm (Super rinforzato)		7-0	0.5	45	BLU	36	Cardiopoint™	8886328801
CV-11 3/8 Cerchio 13mm		5-0	1	75	BLU	36		8886310421
CV-301 3/8 Cerchio 13mm		4-0	1.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886310631
CV-301 3/8 Cerchio 13mm (Super rinforzato)		3-0	2	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886328041
		4-0	1.5	75	BLU	36	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886331431
		4-0	1.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886328031
		5-0	1	75	BLU	36	CARDIOPPOINT™	8886331421
		5-0	1	75	BIANCO	36	Cardiopoint™	8886280121
		5-0	1	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886328021
		6-0	0.7	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886328011



Surgipro™ II and Surgipro™ 7-0, 8-0; Sofsil™ 8-0; Polysorb™, Biosyn™, Monosof™, Maxon™, Velosorb™ Fast sutures differiscono rispetto ai requisiti stabiliti dalla Farmacopea degli Stati Uniti (USP) e dalla Farmacopea Europea (EP) soltanto in occasionali variazioni di calibro.

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita




Cilindrico								
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice	
CV-307 3/8 Cerchio 16mm (Super rinforzato)		3-0	2	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886322941
		4-0	1.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886322931
CV-15 3/8 Cerchio 17mm (Super rinforzato)		2-0	3	90	BLU	36	Surgalloy™	8886264051
		2-0	3	90	BLU	36	Surgalloy™ Pledget 3x7mm F	8886264551
		2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Surgalloy™	8886263656
CV-327 3/8 Cerchio 18mm (Super rinforzato)		3-0	2	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886277541
		4-0	1.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886277531
		5-0	1	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886277521
CV-13 3/8 Cerchio 22mm (Super rinforzato)		3-0	2	90	BLU	36	Surgalloy™	8886262741
		2-0	3	90	BLU	36	Surgalloy™	8886262751
CV-18 3/8 Cerchio 26mm (Super rinforzato)		2-0	3	90	BLU	36		8886264451
		2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6		8886323056

Cilindrico							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
CV-17 3/8 Cerchio 32mm 	0	3.5	75	BLU	36		8886313461
CV-337 1/2 Cerchio 10mm (Super rinforzato) 	5-0	1	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886313921
	5-0	1	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886329821
	5-0	1	90	BLU	36	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886329721
CV-330 1/2 Cerchio 13mm (Super rinforzato) 	3-0	2	60	BLU	36	Cardiopoint™	8886322641
	3-0	2	45	BLU	36	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886329541
	4-0	1.5	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886324931
	4-0	1.5	60	BLU	36	Cardiopoint™	8886322631
	5-0	1	60	BLU	36	Cardiopoint™	8886322621
CV-26 1/2 Cerchio 15mm 	2-0	3	75	BLU	36		VDC950
CV-331 1/2 Cerchio 16mm 	2-0	3	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318651
	3-0	2	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318641
	4-0	1.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318631
	5-0	1	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318621
	2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886309156



Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

Cilindrico							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
CV-331 1/2 Cerchio 16mm (Super rinforzato) 	2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886308356
	2-0	3	8x75	BLU	6	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886308656
	2-0	3	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886308751
	2-0	3	10x75	BLU	6	Cardiopoint™	8886308456
	2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886326956
	3-0	2	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886308741
	3-0	2	10x75	BLU	6	Cardiopoint™	8886308446
	3-0	2	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886327141
	4-0	1.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886308731
	4-0	1.5	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886327131
	5-0	1	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886327121
	CV-24 1/2 Cerchio 20mm 	3-0	2	5x45	BLU	24	D-Tach™

Cilindrico

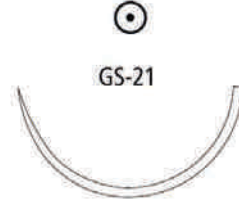
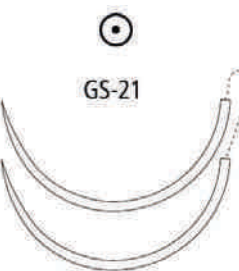
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
CV-316 1/2 Cerchio 20mm (Super rinforzato) 	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm S, Cardiopoint™	VCD236
	2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm S, Cardiopoint™	VCD375
	2-0	3	10x75	BLU	6	Cardiopoint™	8886334456
	2-0	3	75	BLU	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886334851
	2-0	3	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886336951
	2-0	3	90	BIANCO	36	Cardiopoint™	8886283951
	2-0	3	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886322751
	2-0	3	75	BIANCO	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886297851
	3-0	2	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886336941
	3-0	2	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886322741
	4-0	1.5	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886336931
	4-0	1.5	75	BLU	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886334831
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886327756
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886332356
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886332356
GS-23 1/2 Cerchio 22mm 	0	3.5	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886325762
CV-25 1/2 Cerchio 22mm (Super rinforzato) 	2-0	3	90	BLU	36	Surgalloy™	8886337051

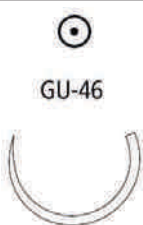

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

Cilindrico							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
CV-305 1/2 Cerchio 25mm 	1	4	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318571
	0	3.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318561
	2-0	3	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318551
	3-0	2	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318541
	4-0	1.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318531
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886335356
CV-305 1/2 Cerchio 25mm (Super rinforzato) 	0	3.5	90	BIANCO	36	Cardiopoint™	8886291461
	0	3.5	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886325661
	2-0	3	6x90	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886330656
	2-0	3	8x90	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886330756
	2-0	3	90	BIANCO	36	Cardiopoint™	8886291451
	2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886298156
	2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm S, Cardiopoint™	VCD346
	2-0	3	10x90	BLU	6	Cardiopoint™	8886322056
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886335656
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886332456
	2-0	3	105	BLU	36	Cardiopoint™	8886303551
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 4x8 mm F, Cardiopoint™	8886303756
	2-0	3	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886325651
	2-0	3	90	BLU	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886333651
	2-0	3	5x75	BLU	6	Cardiopoint™	8886304056
	2-0	3	90	BIANCO	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886295351
	3-0	2	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886325641
	3-0	2	105	BLU	36	Cardiopoint™	8886303541
	3-0	2	90	BLU	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886333641
	4-0	1.5	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886325631

Cilindrico							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
V-20 1/2 Cerchio 26mm	0	3.5	120	BLU	36		8886301561
	2-0	3	120	BLU	36		8886312951
	2-0	3	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886325852
	3-0	2	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886325842
	4-0	1.5	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886325832
V-20 1/2 Cerchio 26mm (Super rinforzato)	2-0	3	90	BLU	36	Surgalloy™	8886325151
GS-22 1/2 Cerchio 27mm	0	3.5	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886325962
	0	3.5	75	BLU	36		8886309361
	2-0	3	75	BLU	36		8886309351
	3-0	2	75	BLU	36		CDC9341
V-30 1/2 Cerchio 30mm	0	3.5	75	BLU	36		8886320561
	2-0	3	75	BLU	36		8886320551
	3-0	2	75	BLU	36		8886320541
CV-300 1/2 Cerchio 35mm	0	3.5	75	BLU	36	Cardioint™	8886308261
	2-0	3	75	BLU	36	Cardioint™	8886308251





Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita



Cilindrico								
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice	
CV-300 1/2 Cerchio 35mm (Super rinforzato)		0	3.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886327461
		0	3.5	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886339361
		2-0	3	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886327451
		2-0	3	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886339351
GS-21 1/2 Cerchio 37mm		2	5	75	BLU	36		8886309081
		1	4	75	BLU	36		8886309071
		1	4	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886326072
		0	3.5	75	BLU	36		8886309061
		0	3.5	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886326062
		2-0	3	75	BLU	36		8886309051
		2-0	3	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886326052
GS-21 1/2 Cerchio 37mm (Super rinforzato)		2	5	90	BLU	36		8886314681
GS-25 1/2 Cerchio 48mm (Non in scala)		1	4	75	BLU	36		8886309771
		1	4	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886326172
		0	3.5	75	BLU	36		8886309761
		0	3.5	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886326162
		2	5	5x45	BLU	24		8886326182
GS-27 1/2 Cerchio 76mm (Super rinforzato) (Non in scala)		0	3.5	75	BLU	36		8886319061

Cilindrico							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
GU-46 5/8 Cerchio 27mm 	2-0	3	75	BLU	36		8886276851
TJ-32 Fish Hook 32mm 	1	4	75	BLU	36		8886310371



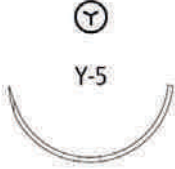
Cilindrico							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
SK SKI 23mm 	0	3.5	120	BLU	36		8886301761
	2-0	3	120	BLU	36		8886301751
SK SKI 23mm (Super rinforzato) 	0	3.5	90	BLU	36		CCD1139

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

Cilindrico							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
HGS-23 1/2 Cerchio 22mm 	1	4	75	BLU	36		8886337571
	0	3.5	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886337462
	2-0	3	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886337452
HGS-22 1/2 Cerchio 27mm 	2	5	5x45	BLU	24		8886337282
	1	4	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886337272
	2-0	3	5x45	BLU	24	D-Tach™	8886337952
HGS-21 1/2 Cerchio 37mm 	5	7	75	BLU	36		8886311179
	2	5	75	BLU	36		8886311381
	1	4	75	BLU	36		8886311371
HGS-24 1/2 Cerchio 40mm 	2	5	75	BLU	36		8886337681
HGU-46 5/8 Cerchio 27mm 	0	3.5	5x45	BLU	24		8886338662

Penetrating Taper							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
YE-7 3/8 Cerchio 18mm 	4-0	1.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886310731
YE-7 3/8 Cerchio 18mm (Super rinforzato) 	2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886305256
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886336556
	2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886265856
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886321156
	2-0	3	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886263151
	2-0	3	75	BLU	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886323351
	2-0	3	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318251
	3-0	2	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318241
	3-0	2	10x75	BLU	6	Cardiopoint™	VCD320
	4-0	1.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886318231



Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

Penetrating Taper							
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice
Y-31 1/2 Cerchio 16mm (Super rinforzato) 	2-0	3	90	BLU	36	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886319151
	2-0	3	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886316051
	2-0	3	75	BIANCO	36	Cardiopoint™	8886288051
	2-0	3	90	BIANCO	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886280851
	2-0	3	90	BIANCO	36	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886281151
	2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886321856
	2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886321956
	2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886285156
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886287756
	2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886325556
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886322156
	2-0	3	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886312551
	2-0	3	90	BLU	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886320451
	2-0	3	4x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x5 mm F, Cardiopoint™	VCD110
	3-0	2	75	BIANCO	36	Cardiopoint™	8886288041
	3-0	2	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886316041
	4-0	1.5	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886316031
	4-0	1.5	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886321836
Y-16 1/2 Cerchio 20mm (Super rinforzato) 	2-0	3	6x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886330356
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886324156
	2-0	3	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886315751
Y-5 1/2 Cerchio 26mm 	2-0	3	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886308851
	3-0	2	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886308841


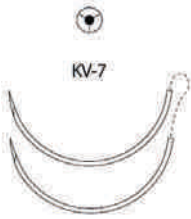



Penetrating Taper

Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
<p>Y-5 1/2 Cerchio 26mm (Super rinforzato)</p> 	0	3.5	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886320261
	0	3.5	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886316761
	0	3.5	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886321366
	2-0	3	90	BIANCO	36	Cardiopoint™	8886281551
	2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm S, Cardiopoint™	VCD256
	2-0	3	90	BIANCO	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886284051
	2-0	3	75	BIANCO	36	Cardiopoint™	8886285551
	2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886321356
	2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x3 mm F, Cardiopoint™	8886320356
	2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886329056
	2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886322256
	2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Cardiopoint™	8886285256
	2-0	3	90	BLU	36	Pledget 3x7 mm F, Cardiopoint™	8886321251
	2-0	3	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886316751
	2-0	3	75	BLU	36	Cardiopoint™	8886320251
	3-0	2	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886316741
	4-0	1.5	90	BLU	36	Cardiopoint™	8886316731

Tapercutting

Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
<p>KV-15 3/8 Cerchio 17mm (Super rinforzato)</p> 	2-0	3	4x75	BLU	6	Surgalloy™	8886313156
<p>KV-26 3/8 Cerchio 26mm (Super rinforzato)</p> 	2-0	3	10x90	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F	8886327556

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita


Tapercutting								
Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cz.	Commenti	Codice	
KV-5 1/2 Cerchio 17mm (Super rinforzato)		2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F	8886323556
		2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F	8886323656
		2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Surgalloy™	8886287956
		2-0	3	90	BLU	36	Pledget 3x3 mm F	8886319351
		2-0	3	90	BLU	36	Surgalloy™	8886315951
		3-0	2	90	BLU	36	Surgalloy™	8886315941
		4-0	1.5	90	BLU	36	Surgalloy™	8886315931
KV-7 1/2 Cerchio 26mm (Super rinforzato)		2-0	3	90	BLU	36	Pledget 3x7 mm F	8886323951
		2-0	3	90	BLU	36	Surgalloy™	8886316851
		2-0	3	8x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F	8886324056
		2-0	3	10x75	BLU e BIANCO	6	Pledget 3x7 mm F	8886322856
		2-0	3	75	BLU	36	Surgalloy™	8886331951
KV-34 1/2 Cerchio 37mm		0	3.5	75	BLU	36		8886311961
KV-37 1/2 Cerchio 40mm		5	7	5x75	BLU	12		8886314789
		2	5	5x75	BLU	12		8886314783
		1	4	75	BLU	36		8886309271
		0	3.5	75	BLU	36		8886309261
KV-40 1/2 Cerchio 48mm (Non in scala)		5	7	4x75	BLU	12		8886281889

Punta a diamante

Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
KV-30 1/2 Cerchio 27mm 	2	5	4x75	BLU e BIANCO	12		8886296283
	1	4	75	BLU	36		8886311771
	0	3.5	75	BLU	36		8886311761

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

Punta di precisione a spatola inversa

Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Commenti	Codice
SS-28 3/8 Cerchio 7mm (Super rinforzato) 	6-0	0.7	45	BIANCO	12	Surgalloy™	D1683K

Pledget

Descrizione	Calibro	Calibro (Metrico)	Lungh. (cm)	Colore	Unità per cfz.	Fino esaur. scorte	Codice
Pledget in PTFE			0		36	Pledget 9.5x4.8 mm F x 5	8886867801
			0		36	Pledget 3x3 mm F x 10	8886867501
			0		36	Pledget 3x7 mm F x 10	8886867701
			0		36	Pledget 3x7 mm S x 10	8886868201
			0		36	Pledget 9.5x4.8 mm S x 5	8886867901

INDICE

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
8886262741	9	8886300352	1	8886305481	3
8886263151	18	8886300821	1	8886305541	2
8886263656	9	8886300831	1	8886305689	3
8886265856	18	8886300841	1	8886305953	6
8886276851	16	8886300851	1	8886306241	5
8886277521	9	8886301151	1	8886306251	5
8886277531	9	8886301261	2	8886306261	5
8886277541	9	8886301561	14	8886306551	2
8886280121	8	8886301751	16	8886306561	2
8886280851	19	8886301761	16	8886306941	2
8886281151	19	8886302351	2	8886307051	2
8886281551	20	8886302361	2	8886308251	14
8886281889	21	8886302371	2	8886308261	14
8886283951	12	8886302671	4	8886308356	11
8886284051	20	8886302681	4	8886308446	11
8886285156	19	8886302779	4	8886308456	11
8886285256	20	8886302871	4	8886308656	11
8886285433	6	8886302881	4	8886308731	11
8886285551	20	8886303541	13	8886308741	11
8886286234	5	8886303551	13	8886308751	11
8886287756	19	8886303756	13	8886308841	19
8886287956	21	8886304056	13	8886308851	19
8886288041	19	8886304321	1	8886309051	15
8886288051	19	8886304521	2	8886309061	15
8886291451	13	8886304631	2	8886309071	15
8886291461	13	8886304731	2	8886309081	15
8886294753	5	8886304741	2	8886309156	10
8886295351	13	8886304851	2	8886309261	21
8886296283	22	8886305041	2	8886309271	21
8886297851	12	8886305051	2	8886309351	14
8886298156	13	8886305061	2	8886309361	14
8886300141	1	8886305256	18	8886309761	15
8886300162	1	8886305451	3	8886309771	15
8886300172	1	8886305461	3	8886310371	16
8886300262	1	8886305471	3	8886310421	8
8886300332	1	8886310943	6	8886310631	8
8886300342	1			8886310731	18

Ti-Cron™/Surgidac™ Sutura sintetica non assorbibile in poliestere, intrecciata e rivestita

INDICE

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
8886311179	17	8886318531	13	8886323056	9
8886311371	17	8886318541	13	8886323351	18
8886311381	17	8886318551	13	8886323556	21
8886311761	22	8886318561	13	8886323656	21
8886311771	22	8886318571	13	8886323951	21
8886311961	21	8886318621	10	8886324056	21
8886312551	19	8886318631	10	8886324156	19
8886312779	7	8886318641	10	8886324931	10
8886312879	3	8886318651	10	8886325151	14
8886312882	3	8886319061	15	8886325556	19
8886312951	14	8886319151	19	8886325631	13
8886313156	20	8886319351	21	8886325641	13
8886313921	10	8886320251	20	8886325651	13
8886314681	15	8886320261	20	8886325661	13
8886314783	21	8886320356	20	8886325762	12
8886314789	21	8886320451	19	8886325832	14
8886315409	3	8886320541	14	8886325842	14
8886315581	4	8886320551	14	8886325852	14
8886315751	19	8886320561	14	8886325962	14
8886315931	21	8886321156	18	8886326052	15
8886315941	21	8886321251	20	8886326062	15
8886315951	21	8886321356	20	8886326072	15
8886316031	19	8886321366	20	8886326162	15
8886316041	19	8886321836	19	8886326172	15
8886316051	19	8886321856	19	8886326182	15
8886316351	4	8886321956	19	8886326742	11
8886316361	4	8886322056	13	8886326956	11
8886316371	4	8886322156	19	8886327121	11
8886316551	5	8886322256	20	8886327131	11
8886316731	20	8886322621	10	8886327141	11
8886316741	20	8886322631	10	8886327451	15
8886316751	20	8886322641	10	8886327461	15
8886316761	20	8886322741	12	8886327556	20
8886316851	21	8886322751	12	8886327756	8
8886318231	18	8886322856	21	8886328011	12
8886318241	18	8886322931	9		
8886318251	18	8886322941	9		

INDICE

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
8886328021	8	8886338042	1	VCD346	13
8886328031	8	8886338052	1	VCD375	12
8886328041	8	8886338062	1	VDC950	10
8886328801	8	8886338072	1	8886867801	23
8886329056	20	8886338082	1	8886867501	23
8886329541	10	8886338109	1	8886867701	23
8886329721	10	8886338189	1	8886868201	23
8886329821	10	8886338556	12	8886867901	23
8886330356	19	8886338662	17	8886262751	9
8886330656	13	8886339351	15	8886264051	9
8886330756	13	8886339361	15	8886264451	9
8886330951	3	8886339511	3	8886264551	9
8886330961	3	8886339561	3		
8886330971	3	8886339571	3		
8886331421	8	8886339581	3		
8886331431	8	CCD1139	16		
8886331951	21	CD0423K	7		
8886332356	12	CD3113K	7		
8886332456	13	CD3123K	7		
8886333641	13	CD496	3		
8886333651	13	CDC7041	2		
8886334456	12	CDC800	8		
8886334831	12	CDC9341	14		
8886334851	12	D1683K	23		
8886335356	13	D1722K	7		
8886335656	13	D1760K	7		
8886336556	18	D1763K	7		
8886336931	12	D1764K	7		
8886336941	12	D1779K	7		
8886336951	12	D1780K	7		
8886337051	12	SCD2864G	5		
8886337272	17	SCD3049G	5		
8886337282	17	SCD3058G	5		
8886337452	17	SCD3059G	5		
8886337462	17	VCD110	19		
8886337571	17	VCD236	12		
8886337681	17	VCD256	20		
8886337952	17	VCD320	18		